

Gebrauchsinformationen

SETUP CLEAN

SETUP CLEAN ist ein hochwirksames alkalische Reinigungsmittel. Ein Gemisch aus 3 Tensiden (nicht-ionogen, neutral) entwickeln eine sehr gute Reinigungswirkung und verhindert mögliche Reaktionen mit Reaktionspartnern im Serum.

SETUP CLEAN zeichnet sich durch seine Eigenschaft aus, Oberflächen aller Art lückenlos zu benetzen. Nur dadurch können die in SETUP CLEAN enthaltenen mikrobiziden Wirkstoffe in Kombination mit den hochwertigen Reinigungsmitteln ihre reinigende Wirkung voll entfalten.

Diese Eigenschaft ist bei Pipettierrobotern, mit einem Schlauchsystem das mechanisch nicht gereinigt werden kann, besonders wichtig.

Durch Micellenbildung werden Ablagerungen von Bakterien, Viren und Pilzen an den Schlauchinnenwänden in der Reinigungslösung gebunden und durch den anschließenden Spülvorgang aus dem System entfernt.

Auch bei Pipettiernadeln, die besonders mit stark proteinhaltigen Materialien in Kontakt kommen, zeigt SETUP CLEAN eine sehr gute Reinigungswirkung.

Das hat zur Folge, dass systembedingte Verschleppungsfehler verringert werden.

SETUP CLEAN ist vollkommen neutral gegenüber Oberflächen aller Art (außer Aluminium) und greift diese nicht an.

SETUP CLEAN wird als Konzentrat ausgeliefert und ist biologisch im Abwasser voll abbaubar.

ANSATZ DER GEBRAUCHSLÖSUNG

Inhalt der Flasche in ein Behälter geben. Dabei Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Nun den Behälter mit 2.5 Liter demineralisiertem Wasser auffüllen.

WARNHINWEIS

Setup clean ist stark reizend. Bei Haut- oder Schleimhautkontakt beachten Sie die Vorschriften des Sicherheitsdatenblatts. Es soll nicht mit Leichtmetallen in Verbindung gebracht werden, da sich Alkalisalze bilden.

Alle anderen Materialien sind gegen verdünntes Setup Clean beständig.

ANWENDUNG

Das System mit SETUP CLEAN füllen, so das alle Schläuche, Spritzen und Pipettiernadeln gefüllt sind. Bei stark verschmutzten Systemen ca. 30 Minuten einwirken lassen.

Bei normal verschmutzten System reichen täglich 10 Minuten Einwirkzeit aus.

Danach das System mindestens 5 x mit H₂O dem. nachspülen.

SETUP CLEAN ist gedacht als Reinigungsmittel für stark verschmutzte Systeme.

Nach Aufbrauchen des Ansatzes wird empfohlen auf DAILY SYSTEM CLEAN umzustellen.

Packungseinheit:

500 ml in PP Flasche

Produktbezeichnung: Setup Clean 1:5

Artikelnummer: 131101

Vertrieb: Hengler Analytik Siemensstr. 9, 61449 Steinbach

Hersteller: WAK-Chemie GmbH Siemensstr. 9, 61449 Steinbach